



TEK-1 WAX

Das System Modellherstellung
Dublieren
Einbetten
Gießen

Verarbeitungsanleitung

- Tauchen Sie das nicht isolierte aber gut polierte und mit einem Tuch trocken und fettfrei geputzte Innenteleskop in das auf ca. 90 Grad erhitzte **TEK-1 WAX**.
- Das Kämpchen sollte mindestens 0,5 mm Stärke haben, dann ist die Temperatur richtig.
- Kühlen Sie das Wachs gleich nach dem Tauchen mit Druckluft ab und ziehen es sofort kräftig ab. Es ist leicht zu lösen, da es sehr elastisch ist.
- **TEK-1 WAX** ist ein selbstisolierendes und sehr elastisches Wachs, was zum einen ohne Isolierung geht und zum anderen brauchen wir die Elastizität für das Umsetzen des auf dem Original Tele komplett fertig modellierten Sekundärteils auf den größeren expandierten EBM Stumpf.

RE 07/2008